

Drogi Audiologu!

- Wykonujemy wkładki pełne toteż wycisk powinien wiernie odzwierciedlać całą conchę wraz z crus, tragus oraz anti-tragus.
- Wymagany jest tzw. wycisk funkcyjny (przy otwartych ustach). Gryzak o grubości 2,5-5cm powinien zostać użyty, o ile nie będzie powodował napięcia mięśni szczęki i/lub nienaturalnego wysunięcia/cofnięcia żuchwy.
- Wycisk powinien być wystarczająco głęboki (co najmniej 2 mm za drugi zakręt kanału słuchowego).
- Preferujemy użycie masy wyciskowej o wysokiej lepkości.
- Możliwe jest użycie tamponików piankowych lub bawełnianych, o ile po ich usunięciu wycisk będzie miał odpowiednią głębokość (za drugi zakręt)
- Odpowiednia jakość wycisku (wierne odzwierciedlenie conhy i kanału słuchowego, odpowiednia głębokość) mają decydujący wpływ na późniejsze dopasowanie. Jeżeli nasuwają się jakiegokolwiek wątpliwości co do wypełnienia powyższych zaleceń wycisk powinien być wykonany ponownie.

Drogi Kliencie!

- Po otrzymaniu wycisków prześlij je wraz z formularzem zamówienia na adres naszego laboratorium. Upewnij się, że będą odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.
- Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości czy wyciski spełniają wymagania, przed wysyłką prześlij nam ich zdjęcia.